


## INSTRUCTIONS pour INSTALLATION et MAINTENANCE “NÉGATOSCOPIES LED”

### INSTALLATION :

- Accrocher au mur le négatoscope, en utilisant les trous façonnés à clé, qui se trouvent sur le dos (Fig. 5)

### UTILISATION:

- **Allumage:**
  - Brancher la prise d'alimentation avec le câble fourni (Fig. 1).
  - Régler l'interrupteur principal sur 1 (Fig. 1); le point s'allumera sur l'écran (Fig. 2).
  - Allumage manuel: le secteur est allumé en appuyant sur le bouton "on / off" (Fig. 2); l'affichage indiquera le degré de régulation mémorisé lors de la dernière activation de 0 à 9 (Fig. 3).
  - Si le mode "Automatique" est désiré, appuyer sur le bouton (Fig. 2); "A" de Automatique apparaîtra sur l'affichage (Fig. 4); le secteur s'allume par des contacts lorsque la plaque est insérée (Fig. 6).
- **Réglage:**
  - Augmenter ou diminuer l'intensité de la lumière à l'aide des boutons (Fig. 2).

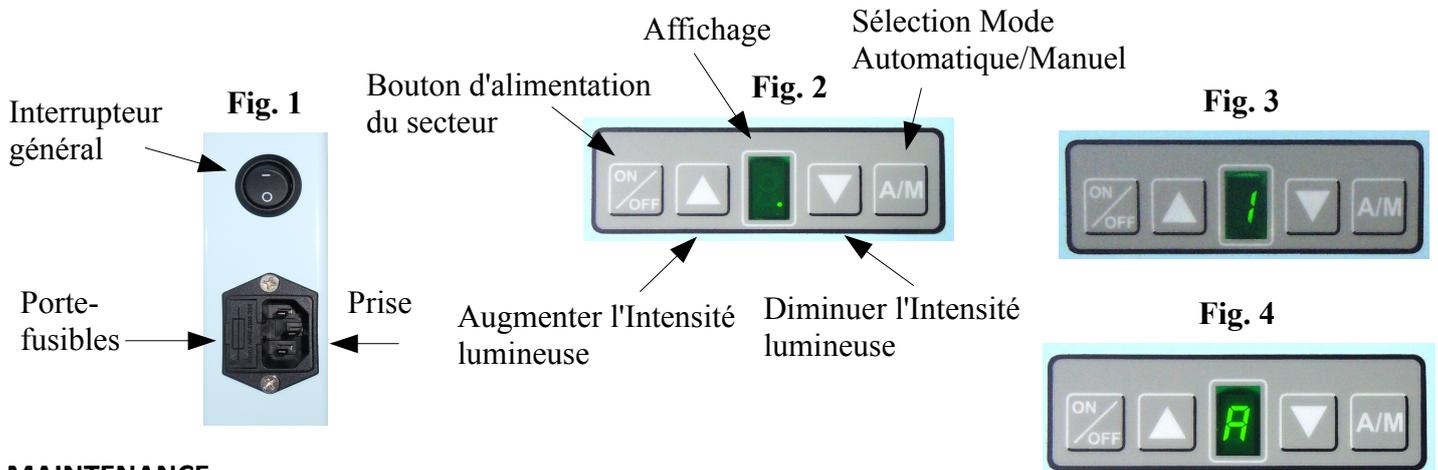


### MAINTENANCE :

- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux et les produits qui ne contiennent pas d'alcool ni solvants.
- Pour accéder à l'intérieur, dévisser le panneau arrière (Fig. 5), opération à effectuer par du personnel spécialisé (vis sur le bord).

Contacts pour le mode "Automatique"

**Fig. 6**

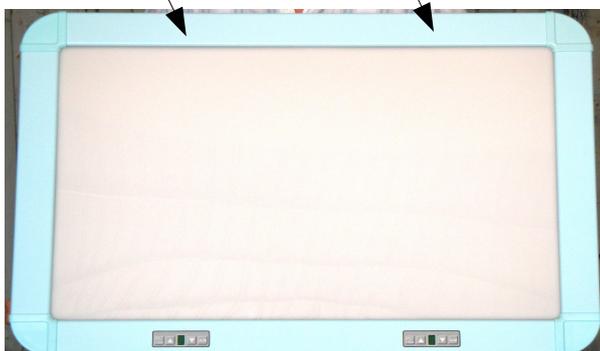

Vis sur le bord

**Fig. 5**

Trou façonné à clé

Vis pour mise à la terre

