


ISTRUZIONI per INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE “NEGATIVOSCOPI A LED”

INSTALLAZIONE :

- Appendere il negatoscopio al muro utilizzando gli appositi fori sul retro a forma di chiave (Fig. 5)

USO :


- **Accensione :**
 - Collegare la presa di corrente con cavo in dotazione (Fig. 1)
 - Posizionare l'interruttore generale su 1 (Fig. 1) si accende il puntino sul display (Fig. 2)
 - Manuale : il settore si accende premendo il pulsante “on/off” (Fig. 2) sul display appare il grado di regolazione memorizzato nell'ultima accensione da 0 a 9 (Fig. 3)
 - Se si desidera la funzione “Automatica” premere il pulsante (Fig. 2) appare sul display la “A” di Automatico (Fig. 4), il settore si accende all'inserimento della lastra tramite contatti (Fig. 6)
- **Regolazione :**
 - Aumentare o diminuire l'intensità luminosa utilizzando i pulsanti (Fig. 2)

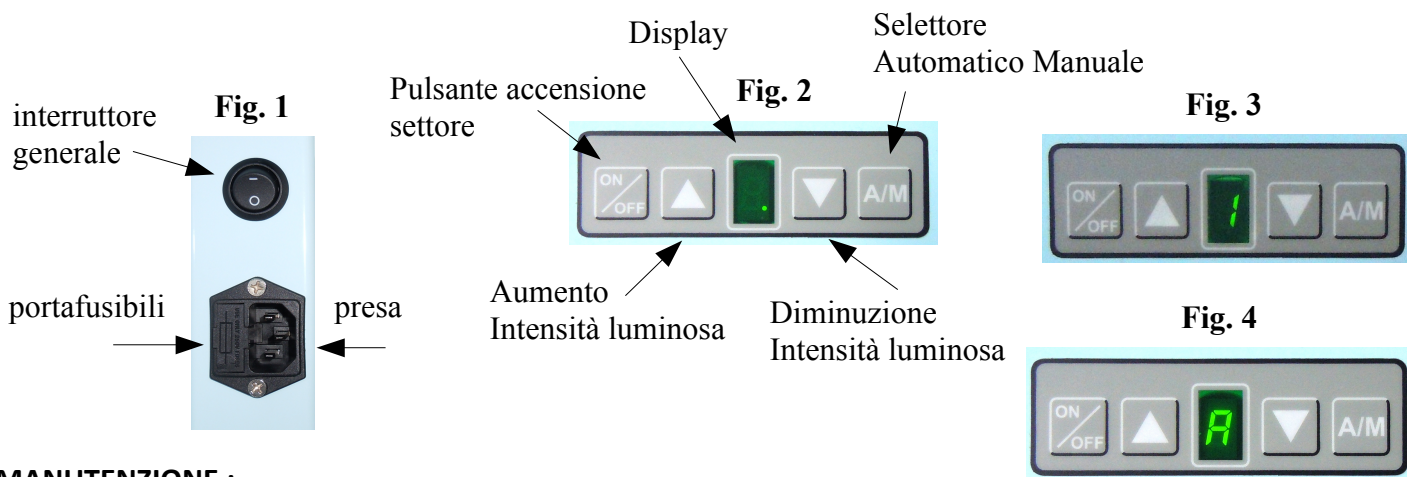

MANUTENZIONE :

- Per pulirlo usare panno morbido e prodotti che non contengano alcool o solventi
- Per accedere all'interno svitare il pannello posteriore (Fig. 5), operazione da effettuare da personale specializzato (viti sul bordo)

Contatti per funzione “automatico”

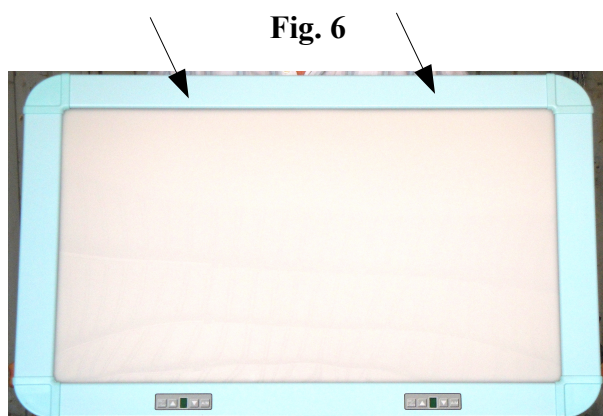

Viti sul bordo Foro a chiave

