

ISTRUZIONI per INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE “ NEGATIVOSCOPI da INCASSO ”

Il negatoscopio offre la possibilità di sostenere le pellicole RX dalla parte superiore con rullini di aderenza

INSTALLAZIONE :

- Svitare la cornice dal cassonetto
- Preparare la nicchia nel muro con le misure indicate in tabella
- Fissare al muro il cassonetto con fischer e viti da applicare ai fori delle alette di fissaggio
- Collegare il cavo di linea alla morsettiere facendolo passare dal foro apposito
- Collegare il filo di messa a terra alla cornice
- Avvitare la cornice al cassonetto


MANUTENZIONE :

Il negatoscopio non ha bisogno di particolare manutenzione.

- Per pulirlo usare panno morbido e prodotti che non contengano alcool o solventi

Per accedere all'interno eseguire le seguenti operazioni :

- Togliere tensione al negatoscopio
- Svitare la cornice dal cassonetto
- Scollegare il filo di messa a terra dalla cornice

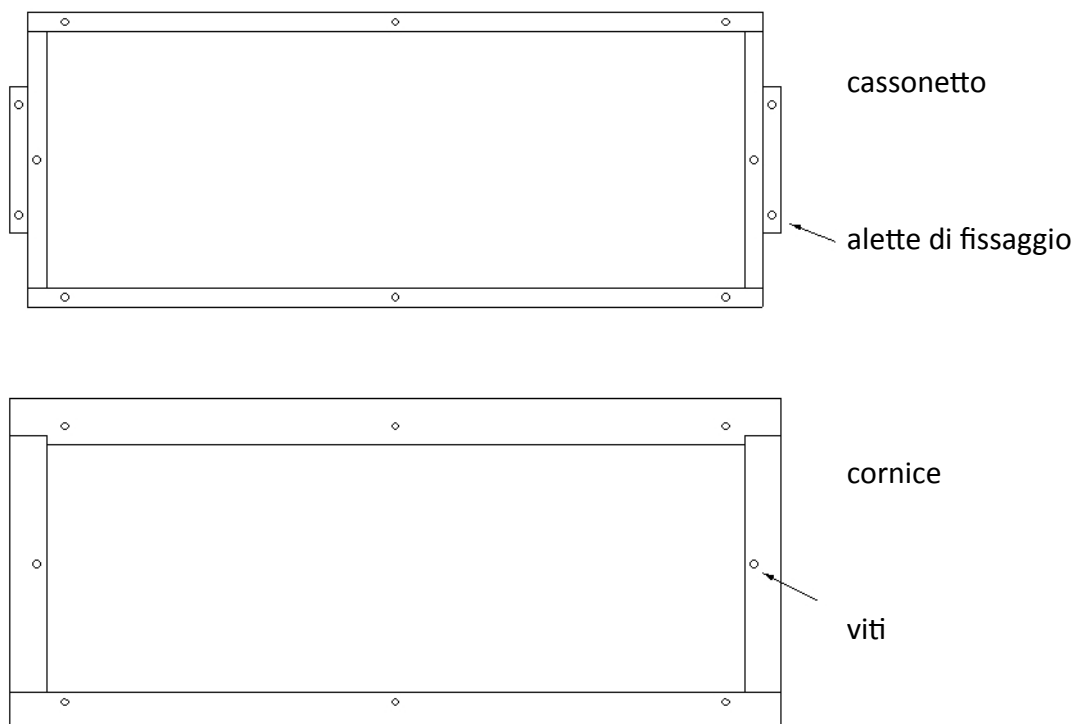

Modelli Settore Luce Cm	Misure Cassonetto Alt/Lun/Pro Cm	Misure Nicchia Alt/Lun/Pro Cm	Misure Cornice Alt/Lun/Pro Cm	Tensione Aliment. V/Hz	Potenza Assorbita W	Corrente Assorbita A	Fusibili Num/A	Lampade Num/W	Starter Num/W/V	Reattori Num/W	Volume Imballo M ³	Peso Con Imballo Kg
90x45	51/95/11,5	52/96/12,5	58/102/1,7	230/50	145	1,3	2/2	3/30	3/4-80/220-240	3/36-40	0,19	12
120x45	51/125/11,5	52/126/12,5	58/132/1,7	230/50	135	1,3	2/2	3/36	3/4-80/220-240	3/36-40	0,242	16
150x45	51/155/11,5	52/156/12,5	58/162/1,7	230/50	212	2,2	2/2,5	3/58	3/4-80/220-240	3/58-65	0,294	20