

ISTRUZIONI per INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE “NEGATIVOSCOPI”

Il negatoscopio offre la possibilità di sostenere le pellicole RX dalla parte superiore con rullini di aderenza e dai lati con mollette in materiale plastico

INSTALLAZIONE :

- Fissare 2 tasselli al muro e applicare 2 viti a gancio
- Appendere il negatoscopio al muro utilizzando gli appositi fori sul retro a forma di chiave

Se si volesse fissare a muro per maggiore sicurezza :

- Fissare 2 tasselli al muro
- Togliere la lastra in plexiglas
- Fissare il negatoscopio al muro utilizzando gli appositi fori sul retro a forma di chiave con 2 viti da tasselli


MANUTENZIONE :

Il negatoscopio non ha bisogno di particolare manutenzione.


- Per pulirlo usare panno morbido e prodotti che non contengano alcool o solventi

Per accedere all'interno eseguire le seguenti operazioni :

- Togliere tensione al negatoscopio
- Svitare la cornice superiore e sfilarla, sfilando anche gli angoli
- Sfilare la lastra in plexiglas
- Per rimontare il tutto infilare la lastra in plexiglas, avvitare la cornice e applicare gli angoli

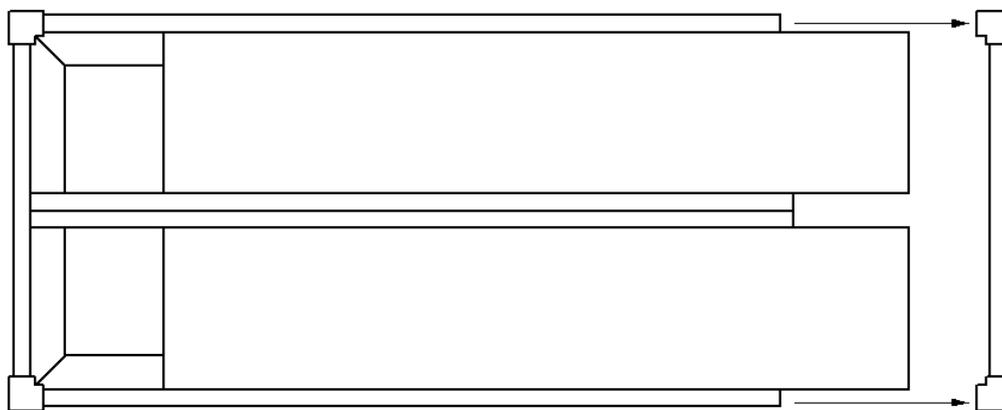

MODELLI
a 2 settori orizzontali

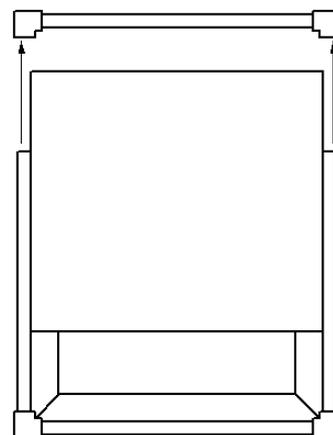

MODELLI
a 1 settore
a 2 settori verticali